


(ST-1000) 简要操作指南

手动模式:




测量模式 → 选择手动

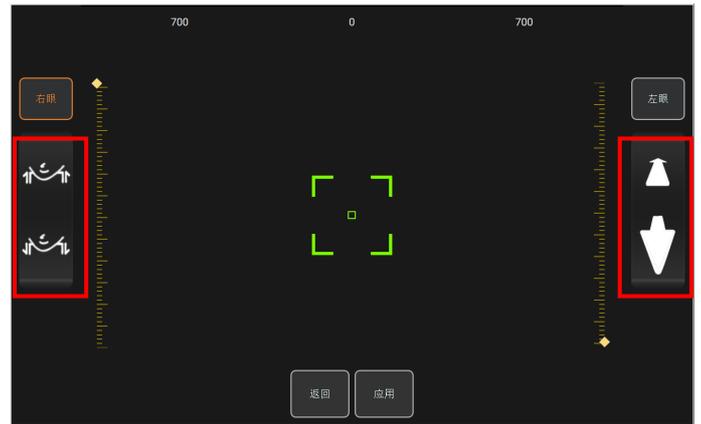

选择安全位置 → 选择右眼/左眼 → 调整颌托 → 选择前进后退

自动模式:

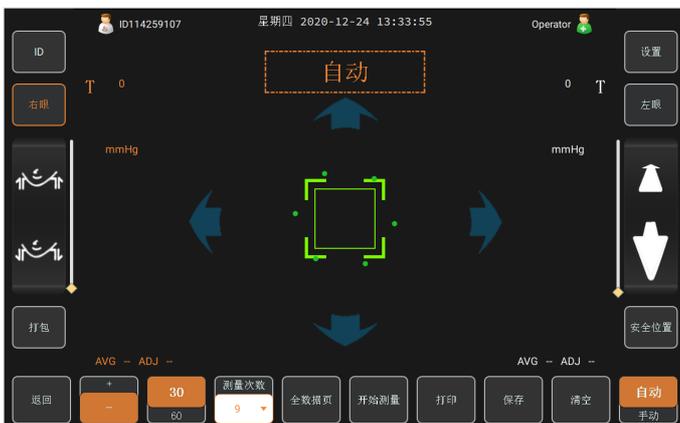

测量模式 → 选择自动，无需操作

右眼					左眼						
	Tono (hPa)	AGD (hPa)	Tono (mmHg)	AGD (mmHg)	PACHO (nm)		Tono (hPa)	AGD (hPa)	Tono (mmHg)	AGD (mmHg)	PACHO (nm)
10	24.8	---	18.6	---	---	10	Err	---	Err	---	---
9	Err	---	Err	---	---	9	24.8	---	18.6	---	---
8	17.9	---	13.4	---	---	8	Err	---	Err	---	---
7	12.5	---	9.4	---	---	7	17.9	---	13.4	---	---
6	Err	---	Err	---	---	6	12.5	---	9.4	---	---
5	Err	---	Err	---	---	5	Err	---	Err	---	---
4	Err	---	Err	---	---	4	Err	---	Err	---	---
3	Err	---	Err	---	---	3	Err	---	Err	---	---
2	Err	---	Err	---	---	2	Err	---	Err	---	---
1	Err	---	Err	---	---	1	Err	---	Err	---	---
AVG	18.4	---	13.8	---	---	AVG	18.4	---	13.8	---	---

测量数据结束 → 点击全局数据页 → 返回

患者管理:

病人信息

ID:

名字:

姓氏:

出生日期:

电话:

备注:

性别: 男性 女性

选择 ID → 病人信息 → 填写表单 → 执行更新 → 保存 → 清空操作

病人信息

ID 名字 姓氏

ID	名字	姓氏	出生日期	性别	创建时间
ID0508212546				保密	2020-11-05 10:08:22
ID050744815				保密	2020-11-05 10:07:44
ID1416062670				保密	2020-09-14 10:16:09
ID1413313029				保密	2020-09-14 10:13:32
ID1407112095				保密	2020-09-14 10:07:14
ID145239116				保密	2020-09-14 09:52:39
ID140912476				保密	2020-09-14 09:09:12
ID145604835				保密	2020-09-14 08:56:05
ID145554672				保密	2020-09-14 08:55:54
ID114259107				保密	2020-09-11 16:42:59

查找病人 → 输入 ID+名字+姓氏 → 查找



患者管理:



历史数据 → 执行载入 → 打印 → 删除操作

数据管理 → 导入 → 导出操作

设置管理:

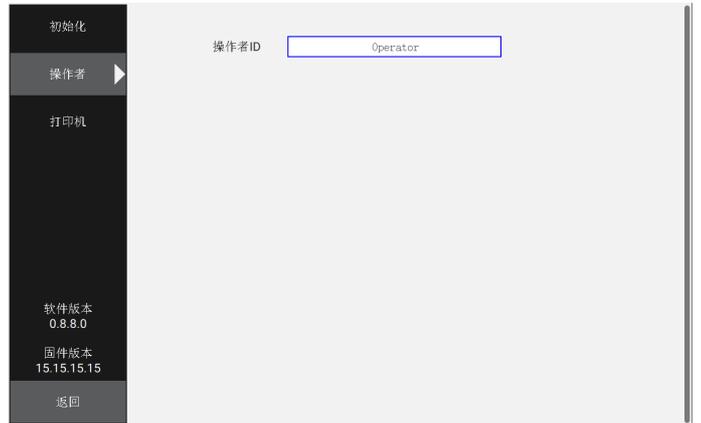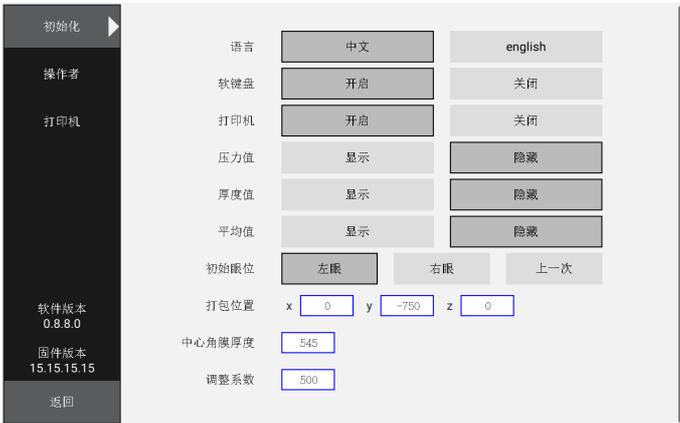

控制面板 → 设置 → 初始化

控制面板 → 设置 → 操作者


设置管理:



控制面板 → 选择设置 → 打印机

控制面板 → 选择返回 → 退出应用 → 重启电脑 → 关闭电脑

功能说明:

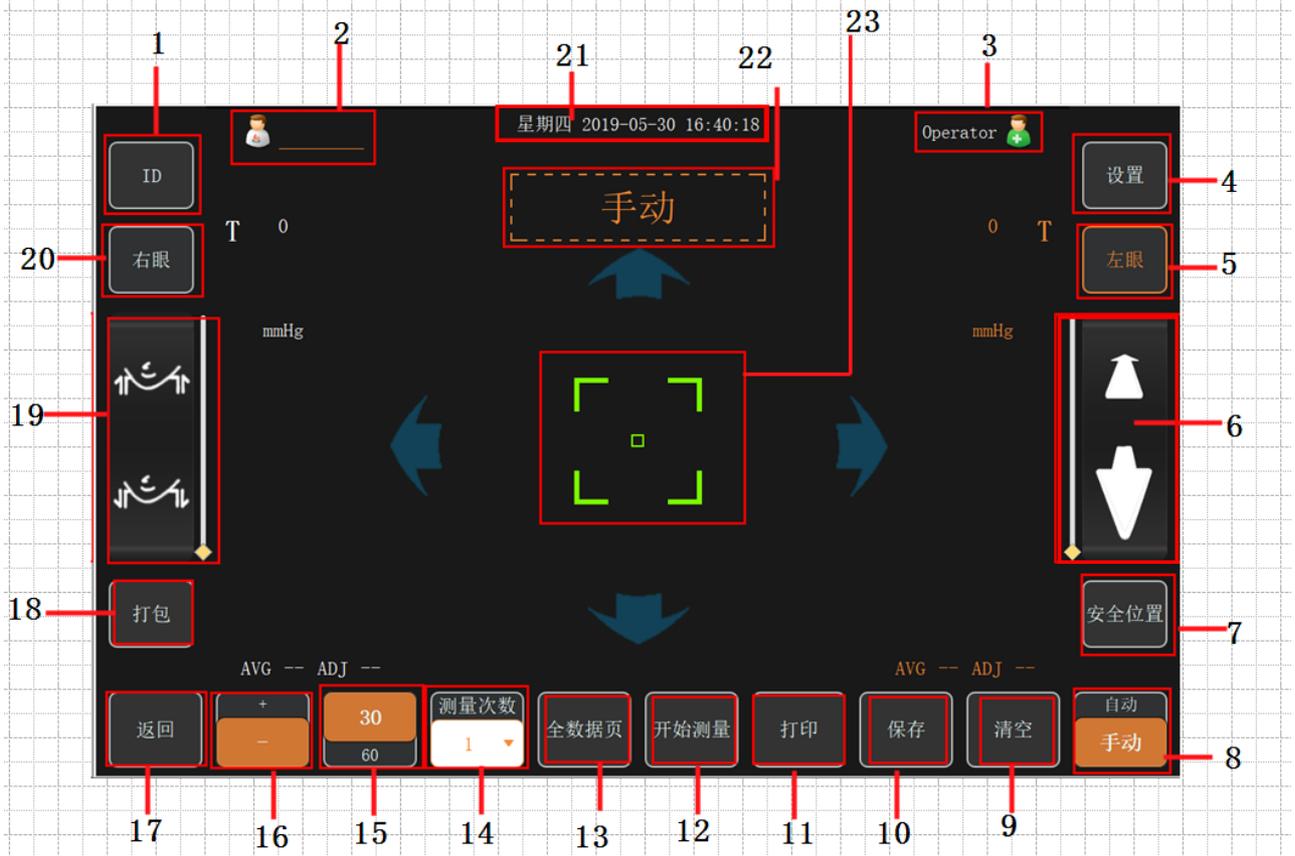

1	病人 ID	9	清空	17	返回
2	医生名称	10	保存	18	打包
3	操作者	11	打印	19	颌托
4	设置	12	开始测量	20	右眼
5	左眼	13	全局数据页	21	日期显示
6	前进后退	14	测量次数	22	测量模式： 手动或自动
7	安全位置	15	吹气速度切换		
8	自动/手动	16	放大缩小	23	对准监视画面